


Bedrade handbediening – IPROXX 2BT

Functies

1. Ruggedeelte omhoog
2. Ruggedeelte omlaag
3. Beengedeelte omhoog
4. Beengedeelte omlaag
5. Hoog-laag functie omhoog
6. Hoog-laag functie omlaag
7. Anti-trendelenburgfunctie
8. Oorspronkelijke basisstand (horizontaal)
9. Bluetooth Aan / Uit
Bluetooth configuratie

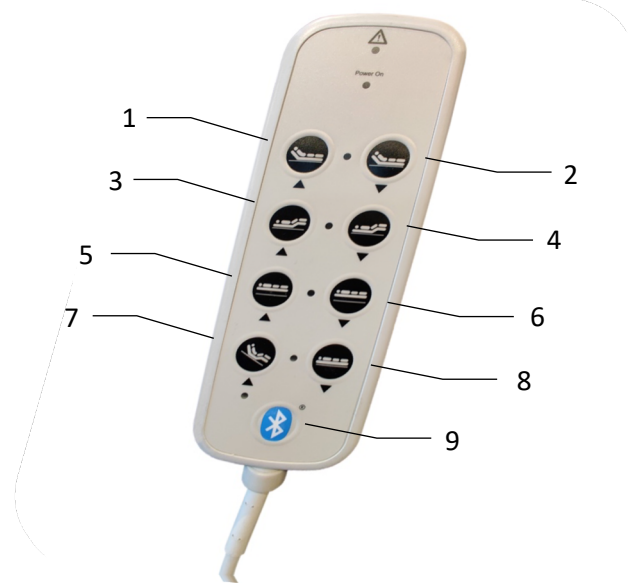

Koppelen van de handbediening aan de motor

Uw handbediening heeft door middel van een krulsnoer een bedrade verbinding met de hoofdmotor in het bed. De bediening is daarom niet voorzien van een batterij, en ook hoeft de bediening niet met een ontvanger verbonden te worden. Zodra u de stekker van de bediening aansluit zal het bed reageren op de functies zoals hierboven beschreven.

Anti-trendelenburg

De anti-trendelenburg (functie 7) is een functie die de verschillende verstelbare functies in het bed combineert en het bed zoveel mogelijk in een zitpositie brengt. Deze zitpositie zorgt er voor dat u als gebruiker de meeste ideale positie heeft om het bed in of uit te stappen. Het bed brengt u vervolgens weer in horizontale positie door de oorspronkelijke basisstand te activeren (functie 8).

Bediening met uw mobiele telefoon (Bluetooth functie 9)

Het is mogelijk om uw mobiele telefoon te verbinden met het bed. Hiervoor maakt u gebruik van de bluetooth knop op de handbediening (functie 9). Een verbonden telefoon zal altijd fungeren als secundaire bediening. De handbediening blijft het primaire bedieningsapparaat.

1. Download in de store van uw telefoon de app: " Dewert smart remote "
2. Draai op de achterzijde van de handbediening het pijltje naar de Configuratiemodus 
3. Druk vervolgens op Bluetooth knop totdat het lampje gaat branden.
4. Draai vervolgens aan de achterzijde het pijltje naar het open slot symbool 
Het Bluetooth lampje gaat vervolgens blauw knipperen.
5. Activeer vervolgens de bluetooth functie op de telefoon en open de Dewert smart remote app. Ga vervolgens naar "Settings" 
6. Selecteer vervolgens het beschikbare bluetooth apparaat, en de telefoon zal zich verbinden met het bed.
7. De bluetooth functie zal alleen werkzaam zijn bij het open slot symbool.